


INSTRUÇÕES PARA A PASSAGEM DO FIO PELO DEEP TUNNEL


1

Fio de Verticalização
(,012" de níquel titânio)
é passado pelos túneis
dos braquetes incisivos
centrais.

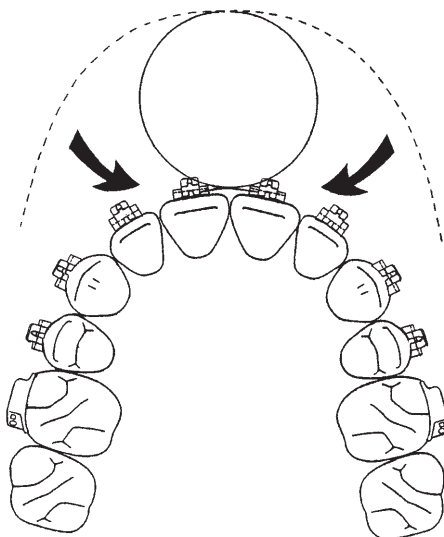


2

Como o fio de
Verticalização se move
distalmente pelos túneis,
o loop da linha mediana
se torna menor.

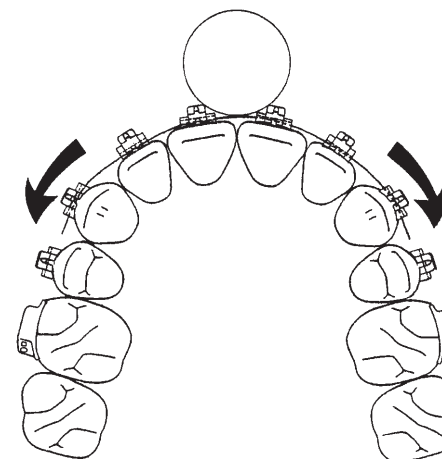

3

O fio de níquel titânio é
finalmente passado pelos
tubos gengivais redondos
nos molares.

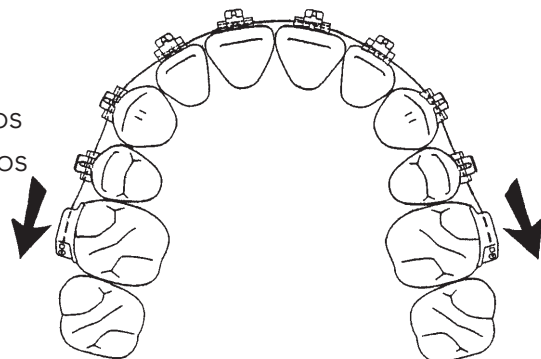

4

O fio principal
pré-contornado de
,022" x ,028" é inserido
nos tubos retangulares
oclusais e ligados a todos
os braquetes.

